

Monitor multiparametrici

Serie SVM-7500



Low cost engineered by Nihon Kohden

Fighting Disease with Electronics

 **NIHON KOHDEN**

Low cost engineered by Nihon Kohden

Utilizzo semplice e intuitivo grazie al display touchscreen

Il display touchscreen permette un utilizzo semplice e intuitivo del monitor. È sufficiente toccare l'area o il parametro di interesse per avere maggiori informazioni o modificare un'impostazione.


120 ore di memoria dati

Il monitor è in grado di memorizzare 120 ore di dati, incluso Full Disclosure.

Tutte le finestre di memoria sono temporalmente interconnesse per facilitare la consultazione e la valutazione dell'evento di interesse.



Trend numerici

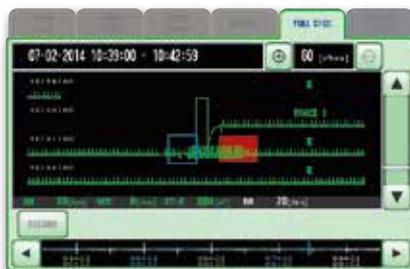

Full disclosure



Storico Allarmi

Centralizzazione e monitoraggio Interbed

Da qualsiasi monitor è possibile verificare i dati vitali e lo stato di allarme di un altro monitor in rete. La schermata Interbed consente di visualizzare 8 pazienti simultaneamente e il singolo paziente.



Schermata Tutti i Letti



Schermata Singolo Letto

SVM-7503
Display da 10,4"



SVM-7523
Display da 12,1"




Guida illustrata sensibile al contesto

Una guida utente illustrata visualizzata a schermo semplifica ancora di più l'utilizzo del monitor: in caso di allarme, oltre al messaggio e alla segnalazione acustica, è possibile visualizzare informazioni illustrate.

La guida include inoltre una legenda che spiega il significato di tutte le icone, delle aritmie e delle abbreviazioni testuali riferite ai parametri di monitoraggio.

Guida illustrata

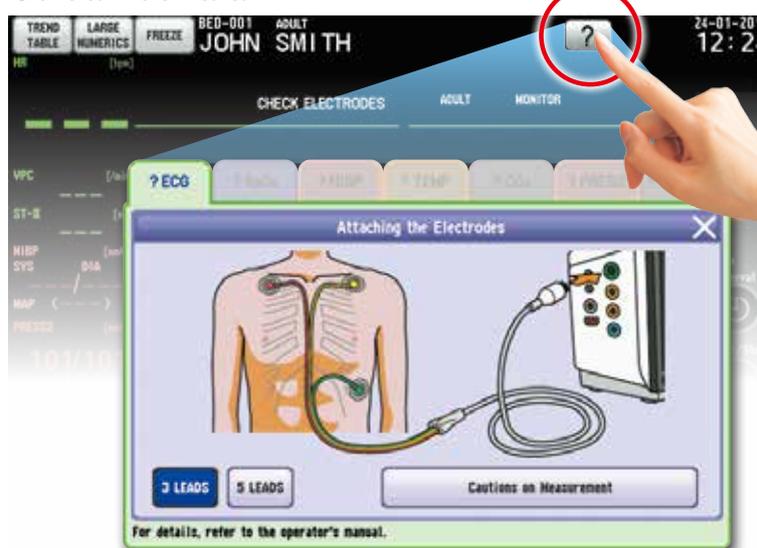

Lista abbreviazioni

PARAMETRO	ICONE	EXPLANATION
CO ₂ -RR		Respiration rate (CO ₂)
DIA		Diastolic pressure
HR		Heart rate
IMP-RR		Respiration rate (impedance)
MAP		Mean arterial pressure
MEAN		Mean pressure
NEP		Non-invasive Blood pressure

Parametri

PARAMETRO	ICONE	EXPLANATION
ASTYSTOLE		Arsystole
BIGEMINY		Ventricular bigeminy
BRADYCARDIA		Bradycardia
COUPLET		VPC couplet
EARLY VPC		Early VPC, including R on T type
FREQ VPC		Frequent VPC (beating or exceeding the preset limit per minute)
TACHYCARDIA		Tachycardia

Aritmie

PARAMETRO	ICONE	EXPLANATION
		All alarm off
		Alarm suspended
		Alarm silence
		Alarm silence with rearming time
		Alarm reset
		Battery status
		Checking data

Icone

Affidabilità, qualità e prestazioni elevate

Per assicurare elevati livelli di qualità e prestazioni, i monitor serie SVM-7500 sono progettati e costruiti ricorrendo agli stessi rigorosi standard comuni a tutti i prodotti Nihon Kohden.

La qualità assicurata da Nihon Kohden consente di ottimizzare i costi di gestione e garantisce un ottimale ritorno sul proprio investimento.

Specifiche tecniche

Display	
SVM-7501, SVM-7503:	10.4" TFT LCD touchscreen a colori
SVM-7521, SVM-7523:	12.1" TFT LCD touchscreen a colori
Risoluzione	800 x 600
Numero di tracce	
SVM-7501, SVM-7521:	4
SVM-7503, SVM-7523:	6
Parameteri	
SVM-7501, SVM-7521:	ECG, Respiro, NIBP, SpO ₂ , Temperatura
SVM-7503, SVM-7523:	ECG, Respiro, NIBP, SpO ₂ , Temperatura, IBP, CO ₂
Tracce memorizzate	120 ore singola traccia ECG (o SpO ₂ se ECG non monitorato)
Trend grafici	120 ore
Lista parametri vitali	120 ore
Richiamo aritmie	120 ore
Storico allarmi	120 ore
Autonomia batteria	6 ore
Registratore termico	3 canali selezionabili (opzionale)
Scheda di rete	Integrata
Interbed	Possibilità di visualizzare fino a 8 letti
Dimensioni	330 L x 274 H x 156 P mm
Peso	4 kg

Brochure soggetta a variazioni senza obbligo di preavviso



NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Germany
Telefono: +49 (0) 6003 827-0, Fax: +49 (0) 6003 827-599
Internet: www.nihonkohden.net, E-mail: info@nke.de

NIHON KOHDEN ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 28, 24124 Bergamo Italy
Telefono: +39 035 21 95 43, Fax: +39 035 23 25 46
Internet: www.nihonkohden.com, E-mail: info@nkitaly.com



SHANGHAI KOHDEN Medical Electronic Instrument Corp.
567 Huancheng Bei Road, Shanghai Comprehensive
Industrial Development Zone, Shanghai 201401, China
Telefono: +86 21 5743 6998, Fax: +86 21 5743 6939
Internet: www.nihonkohden.com